

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

Solução de Desproteínização Diária (Daily Rinse)

REF 7118

MS 80115310227

EasyStat[®]

EasyBloodGas[™]

EasyElectrolytes[™]

EasyLyte[®]

ISE Module

ISE CartridgeSystem



ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO, VERIFIQUE O NÚMERO DA INSTRUÇÃO DE USO E A VERSÃO CORRESPONDENTE NA EMBALAGEM DO MESMO.

PARA OBTER AS INSTRUÇÕES DE USO EM FORMATO IMPRESSO, SEM CUSTO ADICIONAL, CONTATAR O SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: SAC (21) 3907-2534 / 0800 015 1414 / sac@koyalent.com.br

USO PRETENDIDO

Somente para uso diagnóstico in vitro.

Diluyente do Pó de Limpeza Diária

1 x 90 mL

HCl (0,2N) e NH₄F₂(0,05N) e sais (REF7118)

HCl (0,1 N) e sais (REF 2118) (REF 5421) (REF 5824)

Pó de Limpeza Diária 6 frascos

pepsina (0,50 g) (REF 7118) (REF 2118) (REF 5824)

pepsina (0,30 g) (REF 5421)

Armazenagem e Estabilidade

Armazene entre 4 e 25°C até ao fim do prazo de validade indicado nos rótulos.

Perigo

H315 - Provoca irritação cutânea.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H334 - Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

P261 - Evitar respirar as poeiras/fumaças/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P280 - Usar luvas de proteção/ vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial.

P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P342 + P311 - Em caso de sintomas respiratórios: contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P501 - Eliminar o conteúdo e o recipiente em conformidade com todos os regulamentos locais, regionais e nacionais.

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

Preparação

- 1 Adicione o diluente do pó de limpeza diária até encher o frasco de pepsina. Rotule (12 ml) e agite bem.
 - 2 Registre a data.
 - 3 Quando não estiver em uso, mantenha sob refrigeração entre 2 e 8°C.
 - 4 Elimine 4 semanas depois de efetuada a mistura.
- Para ver as definições dos símbolos utilizados nos rótulos do produto, consulte a seção Símbolos no Apêndice do Manual do Operador.

GARANTIA

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Símbolos Usados

	Fabricante
	Limites de temperatura
	Diagnóstico in vitro
	Cuidado, consulte documentos anexos
	Consulte instruções de uso
	Material Reciclável
	Não rejeitar diretamente para o ambiente
	Lote
	Data de Fabricação
	Validade
	Risco Biológico
	Altamente tóxico
	Corrosivo
	Nocivo

Instruções de Uso

Somente para uso diagnóstico in vitro

FABRICADO POR

Medica Corporation

5 Oak Park Drive

Bedford, Massachusetts 01730-1413 USA

Tel 781 275 4892

Fax 781 275 2731

www.medicacorp.com

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Kovalent do Brasil Ltda.

Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro

São Gonçalo – RJ – CEP 24722-414 - Brasil

www.kovalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Farm. Resp.: Jorge A. Janoni

CRF: 2648-RJ

SAC: sac@kovalent.com.br – (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

Data de vencimento e nº de lote: VIDE RÓTULO