

SYSTEM CHECK SOLUTION MassChrom STERIOD PANEL 1

(Solução de verificação do sistema – Painel 1)

MS 10350840357

Para teste de adequação do sistema pelo método LC-MS/MS antes de iniciar as análises.

Somente para uso diagnóstico *in vitro*.

Nº de lote, data de fabricação e validade: vide rótulos dos frascos e da embalagem.

Artigo	Apresentação
72088	1 x 1 mL (liof.)

Introdução

System Check Solution Steroid Panel 1 é designado para adequação do sistema LC-MS/MS antes de iniciar as análises

1. O sistema LC-MS/MS deve ser equilibrado por 10 minutos utilizando as condições iniciais (veja as Instruções de Uso do produto "Steroids in serum/plasma").
2. Injetar o System Check Solution Steroid Panel 1 repetidamente até que dois cromatogramas sucessivos apresentem tempos de retenção e intensidades de sinal idênticos (veja as Instruções de Uso do produto "Steroids in plasma/serum" para informações adicionais).
3. Iniciar a análise.

Condições de Armazenamento

Armazenado abaixo de -18°C System Check Solution é estável até a data de validade presente no rótulo do produto.

Especificações

Variações de $\pm 1\%$ no peso de cada frasco

Comentário

A tabela a seguir contém os analitos do System Check Solution Steroid Panel 1.

Os valores dos analitos variam lote a lote e são informados na bula em inglês que acompanha o produto.

Analitos	
Aldosterona	Corticosterona
Cortisol	11-Desoxycortisol
Cortisona	21-Desoxycortisol

Garantia

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as instruções nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

Descarte

Seguir as disposições da resolução sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes, revisão em vigor.

Símbolos Usados



Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH
Am Hong 12 · 82166 Gröbbling/Altenmünster
Phone: +49 89 18930-0 · Fax: +49 89 18930-199
mailto:info@chromsystems.com · www.chromsystems.com

Importado e Distribuído por: Biosys Ltd.
Coronel Gomes Machado, 358, Centro, Maricá, RJ
CEP: 24020-112 - CNPJ: 02220793/0001-79 - SAC: (21) 3907-2534
sac@biosys.com.br · www.biosys.com.br