

## PROBE CLEANSER

### 【PRODUTO】

PROBE CLEANSER

### 【APRESENTAÇÃO】

50mLx1

### 【INTENÇÃO DE USO】

Limpador de sonda regular para os analisadores da linha MyKov Cell da Kovalent do Brasil, Ltda.

Para uso em diagnóstico *in vitro*.

### 【COMPOSIÇÃO】

Surfactante.....≤0,2%

Sódio hipocloroso.....≤12%

Hidróxido de sódio.....≤5%

### 【ARMAZENAMENTO E ESTABILIDADE】

O produto deve ser armazenado em local escuro e mantido com o recipiente fechado enquanto não estiver em uso.

O produto é estável até a data de validade indicada no rótulo, se armazenado entre 2°C e 30°C.

Uma vez aberto, o produto deve ser utilizado a 10°C-32°C, e é estável por 60 dias.

### 【CUIDADOS E PRECAUÇÕES】

O limpador de sonda é corrosivo e pode causar irritação. Não inalar e/ou ingerir. Em caso de inalação ou ingestão, procure ajuda médica imediatamente.

Evite o contato com a pele. Em caso de contato com a pele, lave a área afetada com bastante água e procure ajuda médica imediatamente.

Evite o contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, lave com água abundante e procure assistência médica imediatamente.

### 【NOTAS】

1. Não utilize o produto após a data de validade.
2. Este produto deve ser operado por profissionais clínicos, médicos ou de laboratório treinados.

### 【GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS】

Seguir as disposições da resolução em vigor que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, bem como outras práticas de biossegurança equivalentes.

### 【GARANTIA】

Estas instruções de uso devem ser lidas atentamente antes da utilização do produto e as informações nela contidas devem ser rigorosamente cumpridas. A confiabilidade dos resultados do ensaio não poderá ser garantida em caso de desvio às instruções.

### 【SIMBOLOGIA UTILIZADA】

|   |  |
|---|--|
|    | Fabricante                                     |
|    | Limite de temperatura                          |
|    | Produto para a saúde para diagnóstico in vitro |
|    | Cuidado  |
|    | Consultar as instruções para utilização        |
|    | Material reciclável                            |
|    | Não rejeitar diretamente para o ambiente       |
|    | Código do lote                                 |
|    | Data de fabricação                             |
|  | Validade                                       |
|  | Riscos biológicos                              |
|  | Altamente tóxico                               |
|  | Corrosivo                                      |
|  | Nocivo   |

### 【INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR】

**Fabricado por:** Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd.

**Endereço:** Mindray Building, Keji 12th Road South, High-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen 518057, P.R.China

**Site:** www.mindray.com

**E-mail:** service@mindray.com

**Tel:** +86 755 81888998

**Fax:** +86 755 26582680

**Importado e Distribuído por:** Kovalent do Brasil Ltda.

**Endereço:** Rua Cristóvão Sardinha, 110 – Jd. Bom Retiro, São Gonçalo – RJ – CEP 24722-350

**Site:** www.kovalent.com.br

**E-mail:** sac@kovalent.com.br

CNPJ: 04.842.199/0001-56

Tel: (21) 3907-2534 / 0800 015 1414

MS – nº 80115310292